



NCM: 34049019

Nome Comercial: Bloco de Cera CAD/CAM Feedek

Vida Útil: 5 anos (Proibido reprocessar / Produto uso único)

Indicações e finalidade de uso Blocos de CERA CAD/CAM Indicado para confecção de padrões de fundição e injeção de cerâmicas prensadas, copings, infraestruturas e coroas em sistemas CAD/CAM

Apresentação Embalagem com 1 ou 5 unidades de BLOCO DE CERA em caixa de papelão indentificados com a marca Feedek.

Composição Composição: Cera de polietileno e LD polietileno e colofônia.

Conteúdo Os Blocos de CERA CAD/CAM Feedek são produzidos nas seguintes espessuras: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm e 25mm, Nos diâmetros: 98mm, 95mm e 89mm. Nas cores: Branco, Cinza, Azul e Marfim.

Informações técnicas

Material de alto peso molecular para a confecção de coroas provisórias unitárias ou múltiplas e base de próteses utilizando sistema de usinagem CAD/CAM.

Item	Parametros técnicos
Ponto de Fusão	108.4°C
Resíduo de ignição 500°C	0,051%

Instruções de Uso

1. Remova o bloco da embalagem e verifique se não existe nenhuma avaria;
2. Fixe o bloco Feedek adequadamente no dispositivo da fresadora;
3. Inicie o processo de fresagem com brocas específicas para esse tipo de material;

importante: Evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento. Temperatura ideal para trabalho: Entre 20°C a 30°C.

Limites:

Limites:

- Posterior: Considerar as indicações do material a ser utilizado - metal (fundição), cerâmica prensada, etc.
- Espessura mínima: 1mm oclusal e 0,6mm cervical • Diâmetros mínimo de conexão: Anterior: 3,6mm; Posterior: 4,4mm

Advertência e Precauções a serem adotadas:

Inalação: Evite a inalação do produto, utilize EPIs durante o manuseio (máscara de proteção). Caso ocorra a inalação, procure um local ventilado e se persistir a irritação procure um médico.

Olhos: Utilize EPIs (óculos) durante o manuseio. Caso ocorra o contato lave com água em abundância. Se persistir a irritação procure um médico.

Ingestão: A ingestão do produto pode causar irritação da mucosa. Caso isso ocorra, enxágue a boca e beba bastante água. Se surgir algum sintoma, procure um médico.

Somente o profissional treinado adequadamente deve manusear este produto. Para o uso somente em laboratório odontológico. Mantenha o produto longe de pressão excessiva e agitação. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou com defeitos. Condições de Armazenamento e Conservação Mantenha a embalagem fechada, longe da umidade e sol, temperatura entre 5 – 50°C e longe dos impactos.

Demais cuidados somente pessoas devidamente treinadas devem manusear o produto, mantenha fora do alcance das crianças.

Descarte: Descarte esse produto de acordo com a lei local, estadual e regulamentações federais.

Elaborado em 29/02/2024. Edição: A.0

Fabricado por:

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co.,Ltd
Endereço: 35 Zhuqing Rd,
Comunidade Shijing
Distrito de Pingshan, Shenzhen
Província de Guangdong, China

Importado por:

Medical BR Comércio e Distribuição de
Produtos Médico-Hospitalares LTDA.
CNPJ:50.636.862/0001-83
Rua Síria, 71 sala 10 - Jardim Oswaldo Cruz -
São José dos Campos - SP CEP 12216-530
Responsável técnica: Angélica Quirino
Oliveira COREN: 679476
Produto não estéril.
Produto Isento de registo ou cadastro na Anvisa

Tel: +55 11 96490.0901
Web: www.feedek.com
Mail: sac@feedek.com