



**NCM: 90222110**

**Nome Comercial:** Bloco de PMMA Feedek

**Vida Útil:** 5 anos (Proibido reprocessar / Produto uso único)

**Indicações e finalidade de uso** Blocos de PMMA para a confecção de restaurações dentárias provisórias como coroas, pontes, Inlay/onlay, criadas e produzidas por sistema CAD/CAM.

**Apresentação** Embalagem com 1 ou 5 unidades de BLOCO DE PMMA em caixa de papelão identificados com a marca Feedek.

**Composição** Polimetilmetacrilato 99,5% e pigmentos < 1,0%.

**Conteúdo** Os Blocos de PMMA Feedek são produzidos nos modelos: Monolayer e Multilayer . Nas seguintes espessuras: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm e 25mm, Nos diâmetros: 98mm, 95mm e 89mm. Nas cores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, Pink.

#### **Informações técnicas**

Material de alto peso molecular para a confecção de coroas provisórias unitárias ou múltiplas e base de próteses utilizando sistema de usinagem CAD/CAM.

Resistência a Flexão	$\geq 50\text{Mpa}$
Absorção de água	$\leq 4\mu\text{g}/\text{mm}^3$
Solubilidade	$\leq 7,5\mu\text{g}/\text{mm}^3$

#### **Instruções de Uso**

1. Remova o bloco da embalagem e verifique se não existe nenhuma avaria;
2. Fixe o bloco Feedek adequadamente no dispositivo da fresadora;
3. Inicie o processo de fresagem com brocas específicas para esse tipo de material;
4. Remova a estrutura fresada do bloco e faça o acabamento com fresas e polidores apropriados;

#### **Contraindicação:**

Contraindicado para uso e manuseio de pessoas com relatada sensibilidade a acrílico e a algum dos componentes do produto.

#### **Advertência e Precauções a serem adotadas:**

**Inalação:** Evite a inalação do produto, utilize EPIs durante o manuseio (máscara de proteção). Caso ocorra a inalação, procure um local ventilado e se persistir a irritação procure um médico.

**Olhos:** Utilize EPIs (óculos) durante o manuseio. Caso ocorra o contato lave com água em abundância. Se persistir a irritação procure um médico.

**Ingestão:** A ingestão do produto pode causar irritação da mucosa. Caso isso ocorra, enxágue a boca e beba bastante água. Se surgir algum sintoma, procure um médico.

**Pele:** Utilize EPIs (jaleco e luvas). Caso ocorra o contato com a pele, lave imediatamente com bastante água. Se surgir algum sintoma, procure um médico.

Somente o profissional treinado adequadamente deve manusear este produto. Para o uso somente em odontologia. Mantenha o produto longe do contato, pressão excessiva e agitação. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou com defeitos. Condições de Armazenamento e Conservação Mantenha a embalagem fechada, longe da umidade e sol, temperatura entre 18 – 33°C e longe dos impactos.

**Demais cuidados** somente pessoas devidamente treinadas devem manusear o produto, mantenha fora do alcance das crianças.

**Descarte:** Descarte esse produto de acordo com a lei local, estadual e regulamentações federais.

**Elaborado em 29/02/2024. Edição: A.0**

**Fabricado por:**

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co.,Ltd  
Endereço: 35 Zhuqing Rd,  
Comunidade Shijing  
Distrito de Pingshan, Shenzhen  
Província de Guangdong, China

**Importado por:**

Medical BR Comércio e Distribuição de  
Produtos Médico-Hospitalares LTDA.  
CNPJ:50.636.862/0001-83  
Rua Síria, 71 sala 10 - Jardim Oswaldo Cruz -  
São José dos Campos - SP CEP 12216-530  
Responsável técnica: Angélica Quirino  
Oliveira COREN: 679476  
Reg. ANVISA: **XXXXXXXXXX**

Tel: +55 11 96490.0901  
Web: [www.feedek.com](http://www.feedek.com)  
Mail: [sac@feedek.com](mailto:sac@feedek.com)

