



DISCOS DIAMANTADOS

NOME COMERCIAL: MANDRIL E DISCOS DIAMANTADOS FEEDEK

NCM:90184919

INDICAÇÃO

Os DISCOS DIAMANTADOS **FEEDEK DURADISC** são instrumentos para polimento e corte em gesso, porcelanas, dissilicato de lítio, cerâmicas, zircônias e metais. Seu uso é exclusivo para profissionais da área odontológica.

APRESENTAÇÃO

Os Discos Diamantados **FEEDEK** são peças abrasivas disponíveis em vários diâmetros e características. Eles podem ser montados em um Mandril (haste) de aço inoxidável. O mandril deve ser conectado a uma unidade de peça de mão específica para essa finalidade. Os discos podem vir montados ou separados de seus mandrils, uma vez que a peça pode ser reutilizável.

MODELOS / FUNÇÃO:

1- Disco de Polimento Diamantado (Duradisc)

Função: Polimento e acabamento fino.

2- Disco de Polimento Diamantado de Corte rápido em Gesso (Duradisc):

Função: Corte em gesso.

3- Mandril para discos de Polimentos

Função: Conectar o disco à peça de mão.

EMBALAGEM

Blister de cloreto de polivinila (PVC). Pode conter 01 (uma), 2 (duas), 3 (três), 05 (cinco), 06 (seis), 08 (oito), 10 (dez) e 12 (doze) unidades de um mesmo código ou sortidas.

Estojo de PVC providos de encaixes. Pode conter 1(uma), 2(duas), 3(três), 4(quatro), 5(cinco) e 6(seis), 10(dez) ou 12(doze) unidades de um mesmo código ou sortidas.

Caixa de papelão 1, 3, 4, 6, 10, 12, 25, 50 ou 100 unidades de um mesmo código ou sortidas.

COMPOSIÇÃO / VELOCIDADE

Os Discos diamantados feedek são compostos dos seguintes materiais:

1-Disco de polimento diamanto,

Velocidade: 10.000 a 15.000rpm equipado com mandril (haste) de clip apropriada.

Material: Aço AISI 304

2- Disco de polimento e corte diamantado em gesso

Velocidade: 10.000 a 15.000rpm equipado com mandril (haste) de clip apropriada

Material: Aço AISI 304

3- Mandril (clip pin) para disco de polimento.

Velocidade: 10.000 a 15.000rpm

Material: Aço AISI 304

NOMENCLATURA

Discos : Exemplo: A 22 D 20		
A:	Característica	(A, Am,B,Bm,C,Cm,D...)
22	Diâmetro	(13,16,19,20,22,30,35,40,45)
D	Faces polidoras	(D = Duas ; S=Mono)
20	Espessura	(0,15/0,2/0,3/0,4/0,45..)

CÓDIGOS DOS MODELOS DISCOS

A	Ab	Am	C	Cb	Cm	E	Em	Hm	J
A22D15	Ab45D30	Am13D15	C19D20	Cb45D30	Cm22D20	E22D20	Em19D20	Hm22D20	J22D20
A19D20		Am19D15	C22D20						
A22D20		Am19D20							
		Am22D20							
		Am19D30							
		Am22D30							
		Am22D40							

CÓDIGOS DOS MODELOS MANDRIS

Mandril
32HS
51HS
52HS
81HS
52D

INSTRUÇÕES DE USO

A utilização de instrumentos não adequados pode dar origem a resultados indesejados.

- 1- Verifique se o disco está em perfeitas condições de uso, sem torções ou falta de concentricidade. Em alta rotação, esses problemas podem levar a acidentes. Descarte imediatamente os discos com problemas.
- 2- Verifique se o motor e a peça de mão estão funcionando perfeitamente.
- 3- Utilize equipamentos de proteção individual (EPIs), como óculos e máscara
- 4- Coloque o disco Feedek no mandril .
- 5- Fixe o mandril na peça de mão, garantindo um encaixe perfeito.
- 6- Ajuste a velocidade de acordo com a técnica a ser empregada, nunca ultrapassando a velocidade indicada para o disco. Velocidades inadequadas podem resultar em risco de fratura do instrumento.

ADVERTÊNCIA E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS;

Somente pessoal treinado adequadamente deve manusear este produto.

1. Para uso somente em odontologia.
2. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou com defeito.
3. As técnicas de utilização dos materiais de acabamento e polimento são altamente especializadas, portanto, todos os atos deverão ser realizados por profissionais devidamente habilitado.
4. Durante o manuseio o profissional deve usar EPI's como: Máscaras de proteção, óculos, jalecos e luvas.

ARMAZENAGEM: Estocar em temperatura ambiente, em local seco e sem incidência de luz solar direta.

PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado

DESCARTE

Descarte este produto de acordo com a lei local, estadual e regulamentações federais.

Elaborado em 23/10/2023. Edição: A.0

Fabricado por: Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co.,Ltd Endereço: 35 Zhuqing Rd,Comunidade Shijing Distrito de Pingshan, Shenzhen,Província de Guangdong, China

Detentor do Registro/notificação: Medical BR Comércio e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares LTDA. CNPJ:50.636.862/0001-83 Rua Síria, 71 sala 10 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP CEP 12216-530 Responsável técnica: Angélica Quirino Oliveira COREN: 679476 Cadastro na Anvisa: 8.27439-3 Registro/notificação Anvisa: 82743930004

Tel: +55 11 96490.0901
Web: www.feedek.com